

16. november 2010



**STATENS  
SERUM  
INSTITUT**

*forebygger og bekæmper  
smitsomme sygdomme  
og medfødte lidelser*

Artillerivej 5  
2300 København S  
Danmark

Tel.: 3268 3268  
Fax: 3268 3868  
serum@ssi.dk  
www.ssi.dk

## **Forhåndsvurdering af FARENA spritservietter**

Sterisol Danmark A/S har bedt om en forhåndsvurdering af produktet FARENA spritservietter.

Det er brugsklare engangsklude i en plastbeholder med 200 stk. Efter åbning er holdbarhedstiden ifølge producenten op til 2 måneder under forudsætning af, at låget i beholderen lukkes efter hver serviet (for at undgå fordampning af ethanol).

Anvendelsesområde: overfladedesinfektion.

Produktet indeholder 70 % v/v ethanol og 5 % v/v isopropanol, og det samlede alkoholvolumen på 75 % opfylder således kravene til desinfektion over for vegetative bakterier og svampe i henhold til de udførte EN-tests (EN 1276 og EN 1650) samt Råd og Anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren, 2004.

**Konklusion:** På basis af de foreliggende data vurderer CEI, at FARENA spritservietter kan anvendes til desinfektion af rene, mindre overflader i sundhedssektoren. Det er væsentligt, at låget i beholderen lukkes omhyggeligt efter hver serviet for at undgå fordampning af ethanol (med resulterende fald i alkoholprocent) i de resterende servietter samt udtørring af disse. Såfremt servietterne ikke længere er fugtige, når de udtages af beholderen, kasseres disse samt det resterende indhold i beholderen, selv om den angivne holdbarhedstid ikke er overskredet.