



Oxivir Excel Wipes

Firmaet Diversey Danmark har indsendt produktet Oxivir Excel Wipes til vurdering i CEI.

Produktet er beregnet til desinfektion af mindre, synligt rene og tørre overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr.

Produktet er klude tilsat aktivstoffet accelereret hydrogenperoxid i en koncentration på < 0,4 % samt rengøringsmiddel.

Den indsendte dokumentation viser tilstrækkelig antimikrobiel effekt over for:

- vegetative bakterier ved en indvirkningstid på hhv. 30 sekunder (EN 13727) og 1 minut (EN 16615).
- gærsvampe ved en indvirkningstid på 1 minut (EN 16615) og 5 minutter (EN 13624).
- skimmelsvampe ved en indvirkningstid på 15 minutter (EN 16615).
- virus ved en indvirkningstid på 30 sekunder (EN 14476).

Konklusion

Der foreligger dokumentation for, at produktet har tilstrækkelig antimikrobiel effekt over for vegetative bakterier, gærsvampe og virus under forurenede forhold.

CEI konkluderer, at Oxivir Excel Wipes findes egnet til overfladedesinfektion af mindre, synligt rene og tørre overflader og ikke-kritiske medicinsk udstyr, hvor anbefalingen er brugen af et desinfektionsprodukt med antimikrobiel effekt over for visse typer mikroorganismer ("low-level" desinfektion).

Note: CEI anbefaler rengøring og desinfektion udført som to separate procedurer, da dette er mere effektive til at fjerne mikroorganismer end rengøring alene, desinfektion alene eller rengøring og desinfektion i en enkelt procedure.